

Instruções de utilização

Por favor leia esta informação cuidadosamente, pois irá ajudá-lo a utilizar HYLO COMOD® da forma correta.

HYLO COMOD®

Hialuronato de sódio 1 mg/ml

Para melhorar a lubrificação da superfície ocular em caso de secura, ardor ou sensação de corpo estranho, devido às condições ambientais, e também após intervenções cirúrgicas oftálmicas. Colírio estéril sem fosfatos e sem conservantes.

O que é HYLO COMOD®?

HYLO COMOD® é uma solução estéril, sem fosfatos e sem conservantes para uso ocular.

Composição:

1 ml de HYLO COMOD® contém 1 mg de hialuronato de sódio, ácido cítrico anidro, citrato de sódio, sorbitol e água para preparações injetáveis.

Para que é utilizado HYLO COMOD®?

Para melhorar a lubrificação da superfície ocular em caso de secura, ardor ou sensação de corpo estranho, devido às condições ambientais, e também após intervenções cirúrgicas oftálmicas.

Quando deve HYLO COMOD® ser utilizado?

A desidratação da superfície ocular pode causar uma sensação de prurido, ardor, ou cansaço nos olhos, sensação de corpo estranho (areia) nos olhos. Por exemplo, durante uma permanência prolongada em salas climatizadas ou atividade frente a um ecrã, a película lacrimal que cobre a superfície ocular pode romper-se mais rapidamente.

Para manter o tecido ocular plenamente funcional, é necessária a constante lubrificação promovida pela película lacrimal.

Devido a intervenções cirúrgicas ao olho ou após agressões ao olho, a secreção fisiológica das lágrimas pode estar reduzida. Porém, para a regeneração dos tecidos superficiais do olho é necessária uma lubrificação contínua e suficiente. A aplicação de HYLO COMOD® fornece uma humidade duradoura à córnea e conjuntiva, pelo que o processo fisiológico de cura é eficazmente suportado.


HYLO COMOD® contém o sal sódico do ácido hialurónico, uma substância natural que se encontra no olho, e outras partes do corpo. Devido à sua propriedade física especial, forma uma película lubrificante uniforme, estável e sobretudo duradoura sobre a superfície ocular, que não é facilmente eliminada. HYLO COMOD® não produz visão turva e o olho é protegido por um longo período de tempo contra a sensação de secura e irritação.

Isto é particularmente importante para os utilizadores de lentes de contacto, dado que as lentes de contacto necessitam de estar sobre uma quantidade suficiente de líquido lacrimal para não causarem desconforto. O HYLO COMOD® pode ser usado conjuntamente com lentes de contacto. O uso de lentes de contacto torna-se mais confortável com a aplicação de HYLO COMOD®, sem que haja formação de crostas ou depósitos.

Sendo HYLO COMOD® livre de conservantes, é normalmente muito bem tolerado. Adicionalmente, HYLO COMOD® não contém fosfatos pelo que são evitadas complicações como a formação de depósitos na córnea.


Como se utiliza HYLO COMOD®?

Utilize HYLO COMOD® apenas se o selo da embalagem estiver intacto antes da primeira utilização (☺).

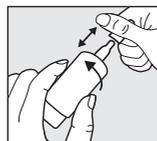


Etapa 1:

Remover a tampa antes de utilizar. Para isto, manter a tampa levemente sobre o frasco e retirar com a outra mão o frasco da tampa com um movimento rotatório. Antes da primeira aplicação, por favor faça girar o frasco de HYLO COMOD® com a sua extremidade para baixo e pressione o fundo do frasco até que a primeira gota apareça no adaptador. O frasco está agora pronto a ser utilizado.

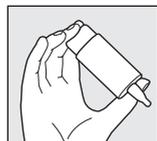

Etapa 2:

Segure o frasco invertido com o polegar na curvatura do frasco e os restantes dedos no fundo do mesmo.

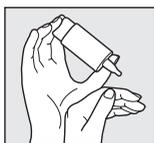


Etapa 3:

Apoie a mão a segurar o frasco COMOD®, tal como demonstrado para a outra mão.



Etapa 4:

Incline ligeiramente a sua cabeça para trás, afaste ligeiramente a sua pálpebra inferior e aplique uma pressão forte e breve na parte central do fundo do frasco. Isto ativa o mecanismo para a libertação de **uma** gota. Devido ao sistema de válvulas especial COMOD®, o tamanho e a velocidade de cada gota são idênticos independentemente de quanta pressão seja aplicada. Feche lentamente os seus olhos para permitir que o fluido se espalhe de forma igual pela superfície do olho.

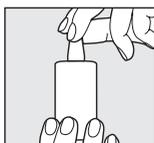

Etapa 5:

Volte a colocar a tampa imediatamente após a utilização. Assegure-se que a ponta do aplicador está seca. Quando aplicar o fluido, por favor evite qualquer contacto entre a extremidade do frasco e o seu olho ou pele.

O frasco COMOD® liberta 10 ml de solução; o que equivale aproximadamente a 300 gotas. Por motivos técnicos, permanece sempre um pequeno volume residual de líquido no frasco no final da sua utilização.

A duração da utilização de HYLO COMOD® não tem um limite definido.

Apenas deve ser tratada uma pessoa com cada frasco de HYLO COMOD®.

O que mais precisa de saber?

Caso utilize quaisquer outros colírios, deverá existir um intervalo de pelo menos 30 minutos entre as aplicações e HYLO COMOD® deve ser sempre aplicado em último. No entanto, as pomadas oftálmicas deverão ser sempre aplicadas após utilizar HYLO COMOD®.

Uma vez que não contém conservantes, o HYLO COMOD® é muito bem tolerado, mesmo quando utilizado ao longo de um período de tempo alargado. Foram relatados casos muito raros de reações de hipersensibilidade, tais como ardor ou lacrimejamento excessivo, que pararam imediatamente quando a utilização de HYLO COMOD® foi interrompida.

Pode acontecer temporariamente visão turva após aplicação de HYLO COMOD® devido à viscosidade do colírio, solução.

Para evitar reações de incompatibilidade que são pos-

síveis devido a interações entre os produtos para lentes de contato e HYLO COMOD®, recomenda-se um intervalo de cerca de 30 minutos após a inserção de lentes de contato para aplicar o colírio.

De acordo com o conhecimento atual HYLO COMOD® pode ser utilizado em crianças, mulheres grávidas e mulheres a amamentar.

Com que frequência e durante quanto tempo pode utilizar HYLO COMOD®?

O HYLO COMOD® deve ser utilizado de acordo com as instruções do oftalmologista ou especialista em lentes de contacto. De um modo geral aplica-se uma gota de HYLO COMOD® em cada olho, 3 vezes ao dia.

Se necessário o HYLO COMOD®, pode ser usado com maior frequência. Se usar HYLO COMOD® com maior frequência (por ex. mais de 10 vezes por dia) deve consultar o seu oftalmologista. HYLO COMOD® é adequado para tratamentos de longa duração. Se os sintomas persistirem, deve consultar o seu oftalmologista.

Quando não deve utilizar o HYLO COMOD®?

O HYLO COMOD® não deve ser utilizado se tiver hipersensibilidade a qualquer um dos seus componentes.

O que precisa de saber acerca de conservar HYLO COMOD®?

Não conservar acima de 25 °C ( 25 °C).

HYLO COMOD® pode ser utilizado durante 6 meses após abertura.

Não usar após a data de validade ().

Conservar fora do alcance de crianças.

Estão disponíveis as seguintes apresentações:

10 ml de colírio

Data da última revisão

Dezembro 2018

Fabricante ():

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Alemanha

Distribuído por:

URSAPHARM, UNIPESSOAL LDA.
Avenida D. João II, N.º 20, 1º Andar, Parque das Nações
1990-095 Lisboa, Portugal
E-mail: info@ursapharm.pt



Dispositivo médico